

bloom



60 Hz
300 Gauss

EQUIPO DE BIOELECTROMAGNETISMO

CARACTERÍSTICAS



bioem


MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

BIOEM

BIOEM es un dispositivo portátil recargable que se puede usar durante el día mientras trabajas, estudias o realizas tus labores cotidianas.

BENEFICIOS

- Brinda un adecuado estado de energía
- Acelera la consolidación de fracturas
- Disminuye los efectos nocivos del estrés
- Mejora la calidad del tejido óseo
- Equilibra el pH celular
- Evita la calcificación de tejidos blandos
- Activa el metabolismo

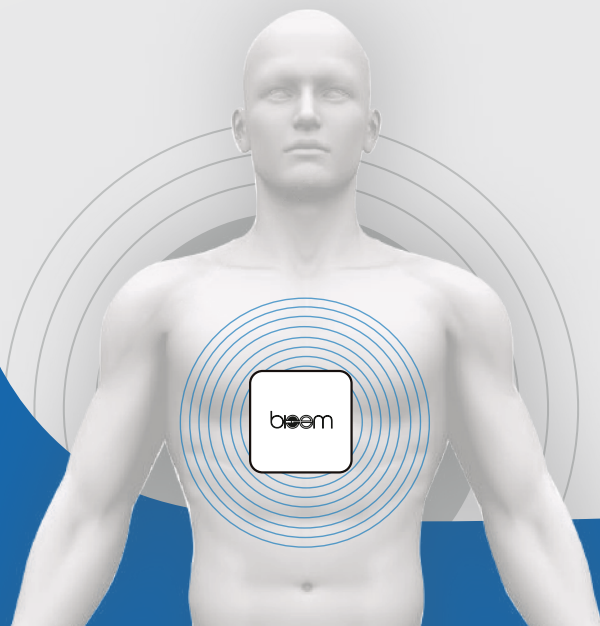

FICHA TÉCNICA


DATOS TÉCNICOS

- Alimentación: 5VDC 1A
- Duración de carga aproximada: ~8 hrs.
- Capacidad de batería: 2200 mA
- Frecuencia: 60 Hz
- Campo Magnético: <300 GAUSS

CONTENIDO




Equipo

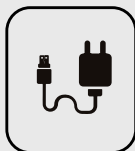

Cargador



Ganchos

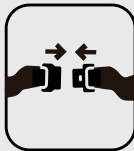

Cinturón



Cinta para cuello



Imán


USO BIOEM

Uso de Cinturón

1.1 Coloca los 2 ganchos incluidos en la caja, uno en cada poste del equipo.

2.1 Pasa el cinturón por los 2 ganchos de forma que puedas ajustarlo y fijarlo con el velcro.

3.1 Ubica el equipo en cualquiera de los puntos de aplicación y ajusta el cinturón para evitar que se mueva.

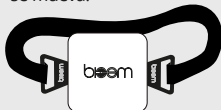

Uso de Colgante


1.1 Coloca uno de los ganchos, incluido en la caja, a un poste del equipo.

2.1 Pasa el extremo del colgante por el gancho y asegúralo con los botones.

3.1 Coloca el colgante en el cuello.



DESCRIPCIÓN DE CONSOLA

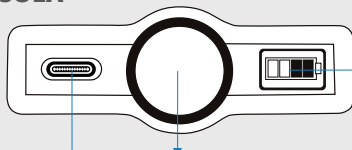

USB:
Carga tu equipo con el cargador que viene en la caja.

Botón on/off:
Encendido y apagado del equipo.

Indicador de carga:
Muestra el nivel de carga de la batería del equipo. Cuando se esté cargando, el nivel de carga que se esté cargando parpadeará.

DESCRIPCIÓN DE CONSOLA

- Limpiar el equipo con un paño húmedo. No mojar.
- No usar mientras el equipo se está cargando conectado a la corriente.

- No usar en lugares donde la temperatura excede los 35°C.
- No deje el equipo cargando más de 12 horas continuas para evitar el desgaste de la batería prematuramente.